

GELECO-GRAPHIC

Caractéristiques:

Gel lubrifiant pour l'insémination artificielle et l'échographie.

Formule hypoallergénique et non spermicide.

Grand pouvoir couvrant et glissant.

Miscible à l'eau.

Respecte le matériel d'intervention.

Ne tache pas.

Composition par ordre décroissant:

Gel aqueux inerte.

Fonction du produit:

GELECO-GRAPHIC peut être utilisé dans les applications d'insémination artificielle et d'échographie.

Mode d'emploi:

1. Insémination artificielle : lubrification des instruments de récolte et de mise en place de la semence.

Recouvrir de GELECO-GRAPHIC l'extrémité de la sonde pour insémination artificielle.

2. Échographie : faciliter une parfaite conduction des ultrasons pour des images claires.

Appliquer le produit sur les instruments.

Couvrir la zone de contrôle de l'animal.

Précaution d'emploi:

L'emballage peut être éliminé en tant que déchet non dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ces déchets.

Ne pas jeter les résidus ou les emballages dans les égouts ou les cours d'eau.

Ne pas laisser sécher le gel en fin de examen, mais essuyer avec un linge propre et sec pour éviter la agglutination de poils.

Produit réservé à l'hygiène animale.

A conserver à l'abri de la lumière, entre +5 et +30°C.

Bidon de 1 litre

GTIN : 03661753068692

Bidon de 5 litres

GTIN : 03661753068685

QALIAN

34 RUE JEAN MONNET

ZI D'ETRICHE

BP 20341

49503 SEGRE cedex

The logo for QALIAN, featuring a stylized 'Q' followed by the word 'ALIAN' in a bold, sans-serif font.