

ISTOGEL

Caractéristiques:

Lubrifiant grâce à sa haute viscosité, ISTOGEL est ainsi miscible dans l'eau et non gras. Ce gel ne tache pas les vêtements. ISTOGEL est utilisé comme protecteur cutané en gynécologie et en obstétrique. Il permet de lubrifier le tractus génital ainsi que les instruments gynécologiques. Par ailleurs, ses propriétés conductrices des ultrasons permettent d'obtenir des images nettes sans interfact sonde-peau. De plus, ISTOGEL n'altère pas les sondes même si du gel reste sur les joints de silicone après usage.

Composition par ordre décroissant:

Gel lubrifiant.
Gel aqueux parfumé de sorbitol et de polysaccharides extraits d'algues marines.

Fonction du produit:

Gynécologie-obstétrique.
Protection des mains de l'opérateur lors des interventions gynécologiques ou des manuvres obstétricales (accouchement, rétention placentaire).
Lubrification du rectum (fouille ou toucher).
Protection des premières voies génitales de la femelle lors d'examen gynécologique ou lors de la mise-bas.
Effet lubrifiant favorisant l'expulsion du nouveau-né.

Echographie.
Conduction des ultrasons dans les diverses applications de l'échographie (médicales, gynécologiques, cardiologiques...).

Examen.
Lubrification des sondes endoscopiques ou des sondes trachéales, sophagiennes et urétrales.

Mode d'emploi:

Usage externe.

Mise en fonction de la pompe :
- enlever le bouchon de protection et visser la pompe sur le bidon ;
- pour déverrouiller la pompe, tenir la bague avec la main gauche et tourner le poussoir avec la main droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ;
- après utilisation et pour éviter toutes fuites pendant le transport, il est possible de bloquer la pompe lors de la dernière pression en tournant le poussoir dans le sens des aiguilles d'une montre.

Gynécologie-obstétrique.
Avant d'intervenir, il suffit à l'opérateur d'enduire d'une fine couche d'ISTOGEL ses mains, ses bras et ses instruments.
Diluer dans 4 à 5 fois son volume d'eau tiède pour obtenir des eaux ftales artificielles.

Echographie.
Une petite quantité d'ISTOGEL suffit pour assurer de bonnes conditions d'examen.

Précaution d'emploi:

ISTOGEL est destiné à un usage vétérinaire.
En cas d'application sur la peau ou le pelage, il est recommandé de ne pas laisser sécher le gel à la fin de l'examen, mais de l'enlever avec une compresse humide pour éviter le dessèchement sur la peau ou l'agglutination des poils.
Ne pas mettre en contact avec la semence.
Ne pas faire avaler.

Flacon de 1 100 g avec pompe doseuse
GTIN : 03661103026716

Bidon de 20 kg avec robinet verseur
GTIN : 03661103026730

MERIAL SAS

Direction Opérations France
13 B, avenue Albert Einstein
69623 VILLEURBANNE CEDEX

SERVICE CLIENT MERIAL

Tél. Ruminants et équidés

04.72.72.70.30

Tél. Aviaire, porcs et lapins de production

02.40.98.64.90

Tél. Animaux de compagnie

04.72.72.55.99

veto.merial.com



UNE SOCIÉTÉ SANOFI