

Date de création : 11-06-2021

Date de mise à jour : 20-02-2018

Informations produit

Caracteristiques

Kit de diagnostic rapide contenant :

- cellules test.
- pipettes à usage unique.
- flacon de réactif.

Utilisation

Chez le chien :

- diagnostic rapide de la dirofilariose.

Mode d'emploi

Réaliser un prélèvement de plasma, sérum ou sang total avec anticoagulant.

Déposer une goutte d'échantillon avec la pipette fournie au centre du puits en maintenant la pipette en position verticale. Attendre 10 à 15 secondes. Ajouter 5 gouttes de réactif au centre du puits en maintenant le flacon de réactif en position verticale.

Laisser migrer 15 minutes et lire le résultat directement dans la fenêtre de lecture de la cellule.

Apparition d'une bande test et d'une bande contrôle : test positif.

Apparition d'une bande contrôle seule : test négatif.

Précautions d'emploi

Ne pas mélanger les réactifs de lots différents.

Conservation

Conserver le kit jusqu'à 24 mois à température ambiante (entre +2°C et +30°C)

Propriétés

Test immunochromatographique rapide sur membrane pour la détection des antigènes de *Dirofilaria immitis*.

Présentations

Présentation et quantité

Speed Diro 6 tests

Code GTIN : 03700600500265

Laboratoire



VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3^e rue LID
06510 CARROS
<http://fr.virbac.com>