

Speed Distemper™

Date de création : 05-10-2021

Date de mise à jour : 20-03-2018

Informations produit

Caracteristiques

Kit de diagnostic rapide contenant :

- cellules test.
- pipettes à usage unique.
- flacons de réactif.

Utilisation

Chez les chiens :

- diagnostic rapide de la maladie de Carré.

Mode d'emploi

Réaliser un écouvillonnage conjonctival, nasal ou salivaire, ou un prélèvement de sérum, plasma, sang total ou urine. Décharger l'écouvillon dans la solution d'extraction ou y déposer 3 gouttes en fonction du type de prélèvement.

Attendre 10 à 15 secondes.

Déposer 4 gouttes du mélange dans le puits échantillon.

Laisser migrer 10 minutes et lire le résultat directement dans la fenêtre de lecture de la cellule.

Apparition d'une bande test et d'une bande contrôle : test positif

Apparition d'une bande contrôle seule : test négatif

Précautions d'emploi

Ne pas mélanger les réactifs de lots différents.

Conservation

Conserver le kit jusqu'à 24 mois à température ambiante (entre +2°C et +30°C)

Propriétés

Test immunochromatographique rapide sur membrane pour la détection des antigènes spécifiques du virus de la maladie de Carré (Paramyxovirus).

Présentations

Présentation et quantité

Speed Distemper 5 tests

Code GTIN : 03700600500012

Laboratoire



VIRBAC France
Espace Azur Mercantour
3^e rue LID
06510 CARROS
<http://fr.virbac.com>