

ALPHATRAK® STARTER KIT



Date de création : 13-09-2018

Date de mise à jour : 13-09-2018

Informations produit

Caracteristiques

Dosage précis et aisé de la glycémie pour les chiens, chats, furets , chevaux, avec des échantillons de sang entier frais, capillaire ou veineux.

La technologie brevetée AlphaTRAK permet de réaliser le test à partir d'un prélèvement minuscule de sang : 0.3 µl suffisent.

Utilisation

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE LA GLYCÉMIE

Utiliser le lecteur AlphaTRAK pour : • Effectuer un dosage de glycémie pour les chiens ou les chats . • Effectuer des dosages avec des échantillons de sang entier frais . • Effectuer les dosages avec des échantillons de sang capillaire entier frais . • Effectuer les dosages avec des échantillons de sang veineux entier frais . • Effectuer les dosages avec du sang entier recueilli dans une seringue ou un tube avec de l'EDTA ou de l'héparine comme anticoagulant pour un dosage dans les 10 minutes . • Effectuer les dosages avec du sang entier recueilli dans une seringue ou un tube sans anticoagulant si le dosage est effectué immédiatement .

Mode d'emploi

Les unités sont exprimées en mmol/L .

• Le lecteur AlphaTRAK a été conçu pour un usage externe (en d'autres mots, pour un usage diagnostique in vitro exclusivement) . • Le lecteur AlphaTRAK est utilisé pour surveiller la glycémie (également connue sous le nom de sucre dans le sang) à partir d'échantillons prélevés sur un chien ou un chat . •

Précautions d'emploi

Ne pas utiliser le lecteur AlphaTRAK pour : • Dosages du sang artériel . • Dosages avec du plasma . Diagnostique avec du sérum . • Diagnostic du diabète

Le lecteur AlphaTRAK ne doit être utilisé qu'avec les bandelettes de dosage de la glycémie AlphaTRAK et la solution de contrôle AlphaTRAK . L'utilisation de bandelettes de dosage ou de solution de contrôle d'autres marques avec le lecteur AlphaTRAK pourrait donner des résultats inexacts .

Propriétés

Especie : CHIENS, CHATS, CHEVAUX, FURETS, SOURIS ET RATS

Echantillon : SANG CAPILLAIRE

Présentation : Une trousse de démarrage (25 bandelettes de dosage, 30 lancettes, solution de contrôle)

Présentations

Présentation et quantité

Laboratoire

ZOETIS



Med'Vet

10 RUE RAYMOND DAVID
92240 MALAKOFF
Zoetis Assistance 0810 734 937
<http://www.zoetis.fr>